


MARIMER® Aspirator nazal pentru bebeluși

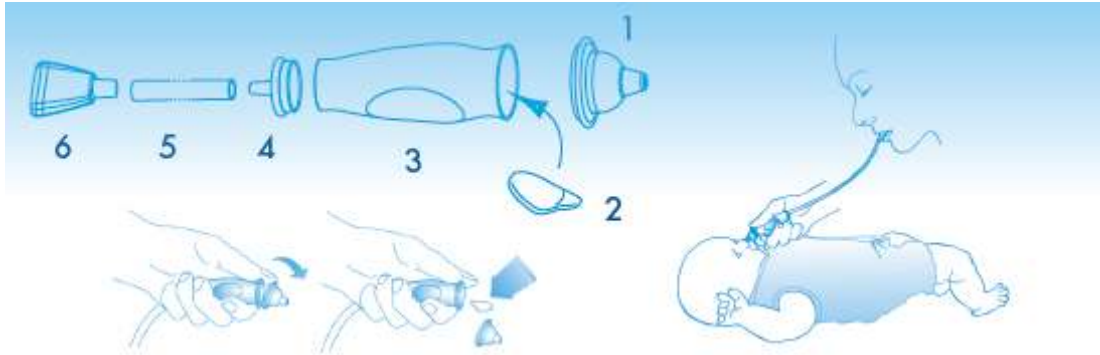

1 - Aplicator nazal / 2 - Wată* / 3 – Rezervor / 4 - Vârful tubului / 5 - Tub / 6 - Aplicator bucal

* nu este inclusă

De ce este importantă folosirea unui aspirator nazal pentru bebeluși?

În primul an de viață, bebelușii respiră doar pe nas și nu stăpânesc tehnica de suflare a nasului. Mucozitățile care blochează nasul bebelușului dumneavoastră îi îngreunează respirația. Prin aspirare, veți ajuta bebelușul să elimine aceste mucozități. Fie că doarme, fie că este alăptat, bebelușul va aprecia confortul unei respirații ușoare.

Instrucțiuni de utilizare:

Pregătirea aspiratorului nazal:

1. Spălați-vă pe mâini.
2. Montați aspiratorul nazal pentru bebeluși Marimer® conform schemei.
3. Introduceți puțină wată, cu rol de filtru, între aplicatorul nazal și rezervor.

Pregătirea bebelușului:

1. Întindeți bebelușul pe masa de înfășat și ridicați-i capul.
2. Introduceți aplicatorul bucal în gura dumneavoastră. Marginea sa vă permite să țineți piesa între dinți.
3. Introduceți aplicatorul nazal într-una din nările bebelușului.
4. Aspirați ușor. Secrețiile se vor colecta în rezervor.
5. Repetați aspirația de câte ori este nevoie.
6. Repetați operația pentru cealaltă nară.

Instilarea de ser fiziologic sau soluție de apă de mare diluată izotonică în fiecare nară facilitează aspirarea secrețiilor.

Instrucțiuni de întreținere:

După fiecare utilizare, dezamblați și curățați atent aspiratorul nazal pentru bebeluși cu apă caldă și săpun, apoi clătiți cu apă rece.

Înainte de fiecare utilizare, pentru o igienă cât mai bună, sterilizați la rece sau cu aburi aplicatoarele pe care le veți folosi. A nu se fierbe.

Înainte de a utiliza aspiratorul nazal pentru prima dată:

Dezasamblați aspiratorul nazal și curățați-l cu apă caldă și săpun, apoi clătiți cu apă rece.
Sterilizați la rece sau cu aburi aplicatorul pe care îl veți folosi.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR.

Producator : Laboratoires Gilbert, Franța